

---

# ROTABED LIT-CHAISE ROTATIF

## MODE D'EMPLOI

---



## 1.1 Caractéristiques techniques

Rotabed Lit Rotatif transformable en chaise	
Capacité de charge maximale	180 kg (400 lbs)
Largeur totale	102 cm (40")
Longueur totale	213 cm (84")
Largeur du matelas	90 cm (35")
Longueur du matelas	190 cm (75")
Réglage de la hauteur	40-80 cm (16"-31.5")
Back Section Angle Adjustment	0°-70°
Foot Section Angle Adjustment	0°-20°


1.2 Rangement - Le lit doit être placé dans un endroit sec et aéré

1.3 Déplacement - Avant de déplacer le lit, il doit être placé dans sa position la plus basse. Utilisez toujours la tête ou le pied de lit pour déplacer le lit et n'utilisez jamais les barrières latérales pour le déplacer. Les freins doivent toujours être actionnés lorsque le lit est en position.



**ATTENTION ! Le cadre principal rotatif est lourd et il faut faire attention en le soulevant. Le montage du lit doit être effectué par au moins deux personnes.**

### 2.1 Éléments du lit

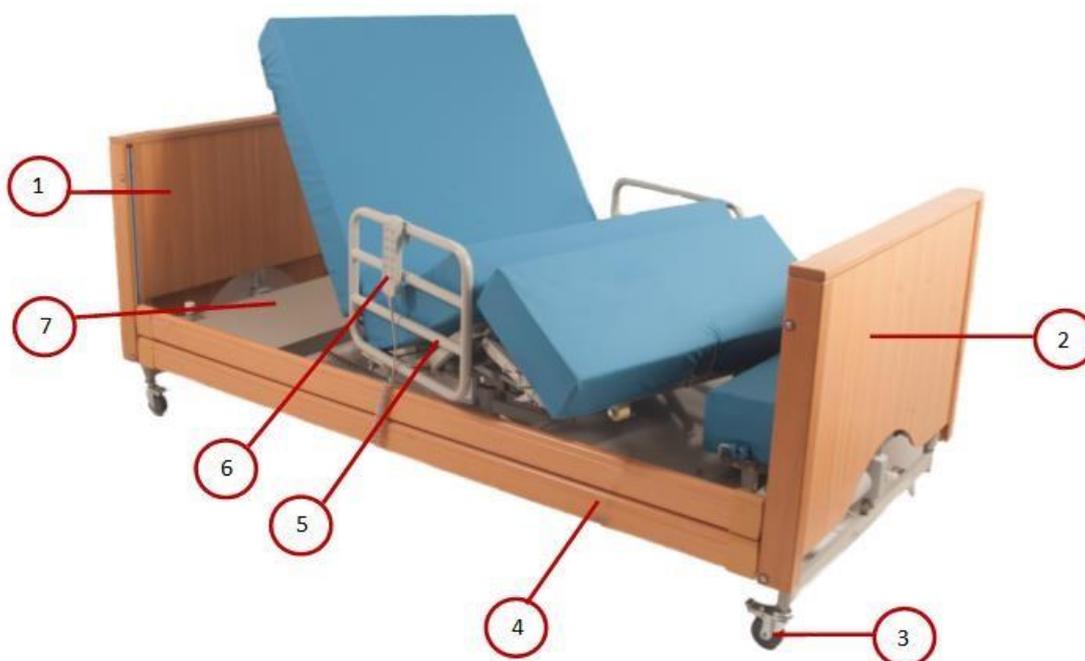

1. Tête/pied de lit
2. Tête/pied de lit
3. Roulette de verrouillage
4. Rails latéraux
5. Barrières latérales de sécurité
6. Rampe d'accès
7. Cadre de calibrage de la rotation principale

### 3.1 Assemblage

- Le lit est livré désassembler.
- Le lit doit être monté sur place par des personnes suffisamment compétentes.
- L'installation doit être effectuée par deux personnes au minimum.
- Le lit doit être positionné sur une surface plate et ne doit pas être posé sur un faux plancher.
- Veillez à ce que le câble d'alimentation électrique soit tenu à l'écart du mécanisme de levage et des roulettes pour éviter d'endommager le câble.
- Assurez-vous systématiquement que les quatre freins de roues soient actionnés lorsque le lit est utilisé.
- Gardez le dessous du lit exempt de tout objet.
- Veillez toujours à ce que les membres ou les parties du corps de l'utilisateur et du soignant ne dépassent pas du lit, ne se trouvent pas entre les barrières latérales ou sur le chemin du mécanisme de levage lorsque vous utilisez les fonctions électriques.
- Lorsque vous soulevez ou abaissez le lit, faites attention à tous les éléments tels que les rebords de fenêtre, les étagères et les prises de courant qui peuvent gêner le levage du lit ou endommager les éléments. Repositionnez le lit si nécessaire.
- Si vous déplacez le lit vers un autre endroit, assurez-vous toujours que toutes les fonctions du lit sont à leur position la plus basse avant de le démonter et n'oubliez pas de retirer les prises de l'alimentation électrique.
- N'utilisez jamais les rails latéraux pour déplacer ou tirer le lit. Utilisez toujours la tête et le pied de lit.
- Actionnez toujours les freins après avoir déplacé le lit.

3.2 Installer la tête de lit/le pied de lit dans l'axe principal du cadre en plaçant une tête/un pied de lit contre un mur avec les freins des roulettes. Veuillez noter que la tête et le pied de lit sont identiques et qu'ils peuvent donc être utilisés indifféremment à l'une ou l'autre extrémité.




3.3 En faisant très attention, placez la base tournante principale sur le côté. Le pied de la base peut être ouvert pour empêcher le basculement de la base.



**ATTENTION ! Le cadre principal pivotant est très lourd, soyez extrêmement prudent lors de la manipulation !**

3.4 Enlevez le couvercle du boîtier de la télécommande et installez les câbles de moteurs de levage de pied/extrémités sur les deux ports indiqués.

Head/foot lift motor

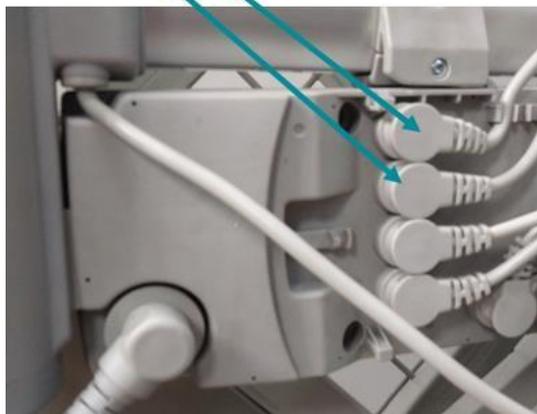

3.5 Tirez sur les deux goupilles de la tête/du pied de lit comme indiqué et verrouillez en position ouverte.



3.6 Abaissez le cadre pivotant sur les crochets et fermez la goupille comme indiqué. Répétez maintenant ceci pour l'autre extrémité du lit.




3.7 Assurez-vous que les câbles de levage et du boîtier de commande soient connectés comme ci-dessous et placés correctement sous le lit. Assurez-vous que le couvercle du boîtier du contrôleur a été remis en place.

Head/foot  
Lift motors

Handset



3.8 Vous pouvez maintenant utiliser la télécommande pour soulever le lit, l'ajuster, etc. Les commandes du dispositif sont indiquées ci-dessous. Assurez-vous également que la clé de sécurité est insérée dans le dispositif. Le dispositif ne fonctionnera pas si la clé de sécurité n'est pas insérée.

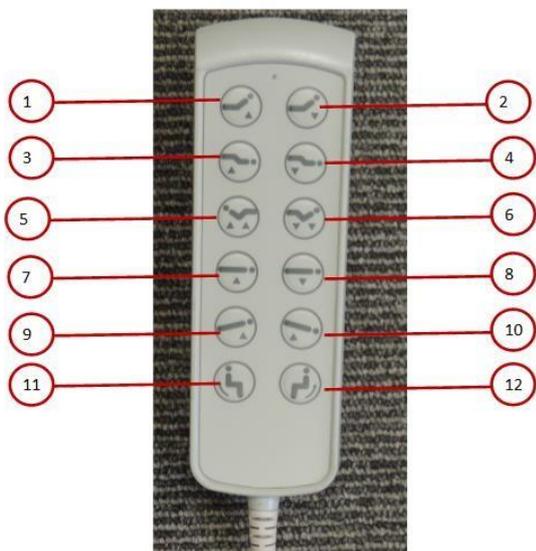


1	Levée du dossier
2	Abaissement du dossier
3	Levée du repose-jambes
4	Abaissement du repose-jambes
5	Levée du dossier et du repose-jambes
6	Abaissement du dossier et du repose-jambes
7	Élévation du lit
8	Abaissement du lit
9	Pivotage avant
10	Pivotage arrière
11	Faire pivoter le lit en dehors
12	Faire pivoter le lit à l'intérieur

3.9 Installez les rampes avec les écrous à ailettes fournis. Assurez-vous que la rampe est correctement montée comme indiqué.



3.10 Installez les barrières latérales de sécurité comme ci-dessous, le lit doit être soulevé pour permettre l'insertion des barrières.

### Composants de curseur de rail latéral :

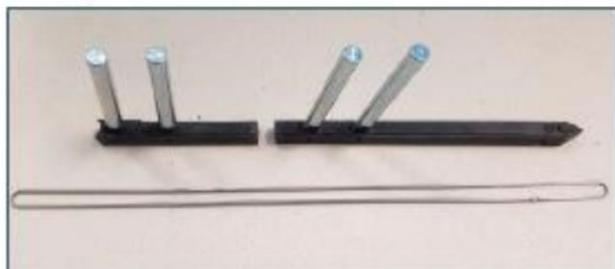

- A) Assembler les composants du curseur de doigt comme indiqué sur la **fig. 1**
- B) Faites glisser les deux sections en plastique ensemble comme indiqué sur la **fig. 2**
- C) Assurez-vous que la boucle de fil est installée au centre dans la rainure incurvée fournie – **fig. 2 et 3**
- D) Appuyez sur le bouton de déverrouillage inférieur à une extrémité et faites glisser l'unité dans le canal au-delà du bouton de déverrouillage inférieur afin qu'il soit maintenu dans le canal comme illustré à la **fig. 4**
- E) Répéter **A** et **B** ci-dessus avec le deuxième curseur et insérer dans les deux rails latéraux comme illustré dans **fig. 5 et 6**
- F) Fixer l'extrémité opposée des rails latéraux dans les doigts insérés dans le canal dans la partie **C** ci-dessus.
- G) Maintenant terminer l'installation en faisant glisser le deuxième curseur dans le canal en appuyant sur le bouton de déverrouillage inférieur comme en **C** ci-dessus.
- H) Tirez les rails jusqu'à ce qu'ils cliquent au-delà des boutons de déverrouillage supérieurs des deux côtés

### Comment les curseurs fonctionnent dans le canal:



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

#### 4.1 Utilisation



**ATTENTION !** Avant d'utiliser le lit, assurez-vous que les patients, les aides-soignants et les autres personnes, en particulier les enfants, n'ont pas de parties du corps ou de membres dans une posture où ils pourraient être écrasés.



**ATTENTION !** Avant d'utiliser le lit, vérifiez que tous les freins des roues sont serrés.



**ATTENTION !** Avant d'utiliser ce lit, assurez-vous que les câbles d'alimentation et les câbles de la télécommande sont dégagés et qu'ils ne peuvent pas être écrasés ou endommagés de quelque manière que ce soit.


#### 4.2 Commande manuelle

Le dispositif est simple et facile à utiliser. Les fonctions sont présentées ci-dessous. Notez que la clé de sécurité doit être insérée pour que la télécommande puisse fonctionner.

**Pour faire pivoter le lit à partir de la position couchée**, appuyez sur le bouton "pivoter vers l'extérieur" (11). Continuez à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le lit ait fini de bouger. L'utilisateur peut maintenant quitter le lit.

**Pour faire pivoter le lit depuis la position assise**, appuyez sur le bouton "rotation vers l'intérieur" (12). Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que le lit soit entièrement tourné.

**Remarque :** le lit est automatiquement réglé à la bonne hauteur pour la rotation après que le bouton de rotation ait été enfoncé.

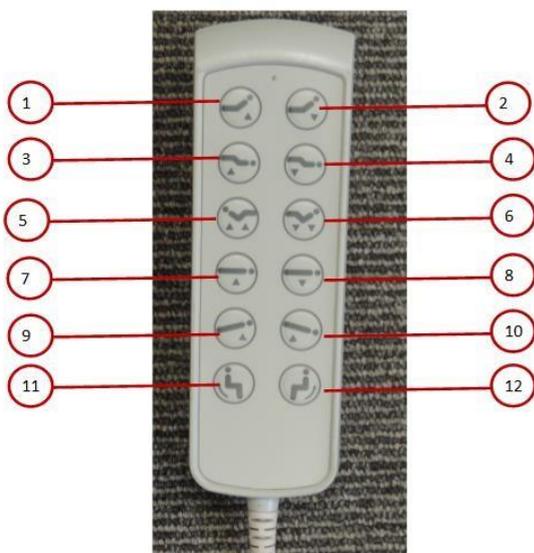

1	Levée du dossier
2	Abaissement du dossier
3	Levée du repose-jambes
4	Abaissement du repose-jambes
5	Levée du dossier et du repose-jambes
6	Abaissement du dossier et du repose-jambes
7	Elevation du lit
8	Abaissement du lit
9	Pivotage avant
10	Pivotage arrière
11	Faire pivoter le lit en dehors
12	Faire pivoter le lit à l'intérieur

---

# ROTABED LIT-CHAISE ROTATIF

## MANUEL D'UTILISATION

---



Produit par Vital Mobility Medical Supplies Inc.  
[www.vitalmobility.ca](http://www.vitalmobility.ca)